

Склад

Стерильний ізотонічний розчин морської води з екстрактом прополісу. Містить натуральні морські мінерали і мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій і ін.

Опис

Спрей назальний з води морської стерильною Атомерому призначений для очищення, зволоження і зменшення набряку носових порожнин. Усуває накопичену слиз, зволожує слизові оболонки носа і робить дихання вільним. Прополіс має бактерицидну, протівірусну, протизапальну та імуностимулюючу дію, має заспокійливі і пом'якшувальні властивості.

Переваги Атомерому ПРОПОЛИС:

- морська вода добувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берега;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіаліз;
- містить прополіс; мікродисперсний система розпилення кошти забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не тягне звикання; не містить пропеллентів, консервантів і барвників; випускається в стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

Рекомендації щодо застосування

Атомерому ПРОПОЛИС РЕКОМЕНДОВАНИЙ:

- при нежиті і закладеності носа при ГРВІ, грипі, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій порожнини носа в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагріву і кондиціонування повітря.

Застереження

Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від світла місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Не застосовувати препарат при наявності алергії до будь-якого компонента.

Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакона і обережно натиснути для закріплення. Рекомендується робити мінімум 4 уприскування в кожную ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики 1-2 вприскування в день.

Придатний для дорослих і дітей старше 12 місяців. Розпилювач Атомерому БЕБІ спрей спеціально розроблений для дітей. Маленький наконечник, який обертається, дозволяє використовувати засіб в будь-якому положенні дитини, усуває ризик пошкодження слизової оболонки носа.

Упаковка

Флакон з дозатором 100 мл в картонній коробці.

Виробник

ФАРМАКОСМЕТІК-ДІАФАРМ СТЕРЖДІОУЛАС Стіліанос & Ко Л.П.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

14-й км Тессалоніках-Полігірос Н.Р., Терме, Тессалоніки, Греція.