

Склад

Paramed One-X – модель із останньої лінійки тонометрів компанії Paramed з анатомічною манжетою. Сучасний прилад із зручним USB-роз'ємом. 5 років гарантії – найкраще підтвердження його якості. Модель вважається найдоступнішим автоматом із базовим набором функцій. Прилад оснащений індикатором аритмії та пам'яттю на 60 вимірів. Головна особливість: функція донакачування повітря до 260 мм рт.

Micro-USB порт для підзарядки.

Функція накачування манжети до позначки 260 мм рт. ст.

Індикатор аритмії. Якщо пристрій спостерігає порушення серцевого ритму, на екрані з'являється відповідний значок.

Анатомічна манжета повторює всі контури тіла і щільно облягає руку, що підвищує точність вимірів. Підходить для плеча обхватом 22-42 см – це універсальний розмір для людей різної комплекції.

Пам'ять на 60 вимірів. Прилад запам'ятовує останні результати, фіксуючи дату та час кожного. Ці дані можна використовувати для самодіагностики або надання звіту лікарю. Коли пам'ять заповниться, її можна обнулити.

Індикатор класифікації ВООЗ. На екрані з'являється шкала, яка показує відхилення від норми артеріального тиску.

Індикатор руху. Якщо людина рухається під час процедури, апарат попередить про це. Як відомо, зайві рухи впливають на точність результатів.

Великий екран, на якому чітко видно цифри.

В комплект входять манжета, батарейки, інструкція та чохол для зберігання.

Більшість тонометрів накачують повітря до позначки 160-170 мм рт.ст., а далі починають спуск. Але якщо ви гіпертонік і тиск часто перевищує це значення, вам потрібен Paramed One-X.

Функція донакачування – це можливість набрати додаткове повітря у манжету, щоб прилад правильно зчитував надвисокі показники. Натискаєте кнопку – і апарат нагнітає ще на 20 мм рт. ст. Так можна повторювати аж до позначки 260 мм рт. ст.

Рекомендації щодо використання

Протягом години перед виміром не можна пити алкоголь та каву, курити, займатися спортом.

5 хвилин перед процедурою посидіть та розслабтеся.

Під час виміру не можна ворухитися, розмовляти, схрещувати руки та ноги.

Манжета повинна бути закріплена на плечі на 2 см вище за ліктювий згин. Переконайтеся, що вона щільно прилягає, але не тисне.

Якщо замір проводиться у положенні сидячи, покладіть руку на стіл на рівні серця.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі у недоступному для дітей місці.

Упаковка

1 тонометр в упаковці.

В комплект входять манжета, батарейки, інструкція та чохол для зберігання.

Виробник

Xiamen Ants-Bro Technology Co., Ltd., China.