

Опис

Призначений для тепловлажних інгаляцій і ароматерапії парами нагрітих розчинів рідких лікарських засобів, в тому числі настоїв і відварів трав, ароматичних масел.

Інгалятор тепловологого застосовують при лікуванні і профілактиці захворювань верхніх дихальних шляхів. Гіпертонічної хвороби, безсонні, стенокардії, ожирінні.

Вказівки до застосування інгалятора

При проведення інгаляцій відварами лікарських трав, приготовлений відвар необхідно охолодити до температури 70 - 80 градусів.

При інгаляціях з використанням настоїв лікарських трав або ароматичних масел, воду для інгаляції необхідно охолодити до 70-80 градусів, після додавати настої трав (4 чайні ложки - 20 мл) або ароматичних масел згідно з інструкцією.

Час проведення інгаляцій - по призначенню лікаря, або відповідно до інструкції застосовуваного засобу (зазвичай 10 - 15 хвилин). Початок інгаляції проводити дуже обережно, перші вдихи робити невеликими порціями.

Протипоказання

Кровохарканье, активний туберкульоз легенів, дихальна або серцева недостатність, рецидивний спонтанний пневмоторакс, наявність новоутворень верхніх дихальних шляхів.

Комплектація

- корпус;
- чашка - на 600 мл;
- кришка;
- маска;

Розміри інгалятора: висота 200 мм, діаметр 180 мм.

Виробник

ПАТ "Гемопласт", Україна.