

Призначення

Спринцівки застосовуються для медичних цілей в лікувальних установах, а також для індивідуального використання в домашніх умовах. Спринцівка типу Б являє собою балон, в горловину якого вставлений наконечник.

Спосіб застосування та дози

Перед першим використанням балон спринцівки ретельно вимити гарячою водою та продезінфікувати кип'ятінням протягом 30 хвилин, після чого промити кип'яченою водою. Наконечник поліетиленовий необхідно простерилізувати зануренням у 6% розчин перекису водню на 6 годин. Після стерилізації наконечник необхідно промити кип'яченою водою. В подальшому спринцівку перед використанням промити гарячою водою і сполоснути кип'яченою водою. Перед використанням наконечник необхідно змастити нейтральним жиром.

Балон спринцівки стиснути рукою, наконечник опустити в медичний розчин і, послабивши тиск на балон, наповнити його розчином. Потім ввести наконечник спринцівки в порожнину організму і стискаючи наповнений балон, ввести рідину. Після використання спринцівки необхідно промити гарячою водою.

Спринцівка повинна контактувати з лікарськими розчинами не більше 30 хвилин. Містить фталати. Спринцівку для олій не застосовувати.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі.

Упаковка

Спринцівка у картонній упаковці.

Виробник

ТОВ "Поліком", Україна.