

## **Опис**

Ланцети Accu-Chek Softclix забезпечують практично безболісне, гігієнічне та безпечне отримання краплі крові.

- дизайн у вигляді ручки;
- виключення ризику пошкодження шкіри;
- практично безболісне отримання краплі крові;
- діаметр голки: 0,4 мм;

## **Опис**

Ланцети - необхідна складова медичного пристрою для проколювання шкіри. Вони застосовуються при проведенні аналізів, в тому числі при дослідженні рівня глюкози в крові у хворих, які страждають на цукровий діабет.

Сучасні розробки німецької компанії Акку-Чек дозволили зробити цей процес швидким і практично безболісним. При цьому повністю гарантується стерильність проведення проколу.

Ланцет для ручки-пркаливателя Акку-Чек - це найтонша голка в пластиковому корпусі.

Ланцети використовуються один раз, до самої голці пацієнт не торкається. Так досягається необхідна стерильність при проколюванні шкіри.

## **Спосіб застосування**

Користуватися пристроєм Акку-Чек Софтклікс дуже легко завдяки його невеликому розміру і зручному дизайну:

1. Зніміть ковпачок.
2. Вставте новий ланцет в спеціально призначений для цього місце і натисніть до клацання.
3. Закрийте пристрій ковпачком - теж до клацання.
4. Переконайтеся в тому, що круговий регулятор глибини проколу встановлений на потрібному вам рівні.
5. Натисніть кнопку взводу до клацання.
6. Акуратно притисніть пристрій до пальця і натисніть на кнопку спуска.
7. Після проведення вимірювання рівня глюкози зніміть ковпачок з пристрою і видаліть ланцет.

Більш детальну інформацію про роботу пристрою можна знайти в керівництві користувача.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому місці.

### **Упаковка**

По 25 шт в упаковці.

### **Виробник**

Roche Diabetes Care GmbH, Німеччина.