

Особливості

- міцний до вигину, зламу, не викликає алергії завдяки матеріалу виробництва;
- гостро заточений тригранний центральний спис мінімізує болючість проколу, бічні обмежувачі фіксують його глибину;
- оптимальний розмір леза дозволяє за 1 прокол мінімально травмувати тканини та отримувати достатній об'єм крові.

Призначення

Скарифікатор (ланцет) є металевою пластиною з центральним гострим зубцем у вигляді списа. Застосовується для проколювання шкіри пальця при заборі проб капілярної крові для клінічних досліджень.

Спосіб застосування

1. Перевірити цілісність індивідуальної упаковки.
2. Обробити місце пунції 70% ізопропіловим спиртом та дати висохнути.
3. Розкрити індивідуальну упаковку, дістати скарифікатор.
4. Зробити пункцію.

Умови зберігання

Зберігати у чистому та темному місці.

Упаковка

Скарифікатор в індивідуальній упаковці, по 200 шт в картонній упаковці.

Виробник

ТОВ "ІГАР", Україна.