

Склад

Cellulose gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Carbomer, Silica, Cera Alba, Aroma, Limonene.

Опис

Крем для фіксації зубних протезів Корега Комфорт забезпечує екстра комфорт для ясен і захист від тиску, тертя і роздратування, які можуть бути викликані використанням зубних протезів.

Завдяки технології Adaptagrip, даний крем є не просто фіксатором, а й гідроактивіруємим гелем, який містить карбомер і карбоксиметилцеллюлозу. Створений спеціально для того, щоб почати працювати з перших секунд після нанесення, він допомагає забезпечити щільне прилягання і створює захисний амортизуючий шар між твердими протезами і м'якою тканиною ясен на весь день.

Властивості

- пом'якшує і запобігає роздратування ясен;
- легко наноситься за допомогою вузького носика-аплікатора;
- надійно фіксує протез протягом 12 годин.

Спосіб застосування та дози

Очистіть і висушіть зубний протез. Нанесіть невелику кількість засобу крему Корега Захист Ясен короткими смужками не дуже близько до країв зубних протезів. Прополощіть рот теплою водою перед установкою зубного протеза. Вставте протез в ротову порожнину, плавно притисніть і зімкніть щелепи для кращої фіксації на кілька секунд. Не наносіть частіше ніж один раз на день.

Умови зберігання

Зберігати при температурі до 25°C, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 г в тубі, по 1 тубі в картонній коробці.

Виробник

етол Гузундхейтспфлег-унд Фармапродукт Гмбх, Німеччина.