

## **Склад**

Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.

## **Властивості**

Дихання через ніс - єдиний правильний спосіб дихання, який життєво важливий для розвитку та зростання дитини. Тому турбота про гігієну носа важлива з перших днів життя. Суха слизова оболонка носа, забруднюючі скупчення і носові виділення, набряк слизової оболонки носа не дають проходити повітря вільно через ніс дитини. Це може викликати крик та роздратування дитини, порушення сну та годування.

### **Властивості:**

- Аква Маріс® Бебі Інтенсив підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа та зволожує її;
- Аква Маріс® Бебі Інтенсив призводить до механічного очищення слизової оболонки від вуличного і кімнатного пилу, слизових виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо), діючих на слизову оболонку;
- При запальних захворюваннях носа з явним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень використання засобу Аква Маріс® Бебі Інтенсив сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання;
- Аква Маріс® Бебі Інтенсив розріджує слиз та нормалізує його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;
- Аква Маріс® Бебі Інтенсив покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів;
- Завдяки своїм властивостям та складу Аква Маріс® Бебі Інтенсив відновлює функції носа, тим самим зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень.

## **Показання до використання**

**Аква Маріс® Бебі Інтенсив назальний спрей з насадкою, що спеціально розроблена для дітей, застосовується:**

Як допоміжний засіб при лікуванні:

- гострих і хронічних запальних процесів та захворювань носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології;
- інфекційних захворювань носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (ГРЗ, ГРВІ та застуда);
- гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
- алергічного сезонного або цілорічного риніту, вазомоторного риніту;
- для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
- в післяопераційний період після хірургічних втручань на органах носової порожнини.

Для щоденної гігієни порожнини носа та з профілактичною метою:

- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- профілактика інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- зменшення сухості слизової оболонки носа у осіб, що живуть і працюють у приміщеннях із кондиційованим повітрям та/або центральним опаленням, з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах;
- особам, у яких слизова оболонка порожнини носа та верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії автотранспорту, люди, що працюють у гарячих і запилених цехах, а також, які мешкають у регіонах із суворими кліматичними умовами).

## **Спосіб застосування та дози**

### **З профілактичною та гігієнічною метою**

Дітям від 1 місяця до 1 року по 1-2 впорскування у кожний носовий хід 1-2 рази на добу. Дітям від 1 до 7 років по 1-2 впорскування у кожний носовий хід 1-3 рази на добу; дітям від 7 до 16 років та дорослим по 2-3 впорскування у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.

### **Як допоміжний засіб при лікуванні**

Дітям від 1 місяця до 1 року по 1-2 впорскування у кожний носовий хід 3-4 рази на добу. Дітям від 1 до 7 років по 2 впорскування у кожний носовий хід 3-4 рази на добу; дітям від 7 до 16 років та дорослим по 2 впорскування у кожний носовий хід 4-6 разів на добу

## **Особливості застосування**

Виріб застосовують дітям з першого місяця життя завдяки натуральному складу та спеціальній конструкції насадки розпилювача. Виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання, не містить консервантів. Дітям молодшим 1 місяця доцільніше застосовувати Аква Маріс® назальні краплі.

### **Форма випуску**

По 50 або 150 ml (мл) у балончику, 1 балончик у картонній коробці.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці. Зовнішній контейнер заповнений інертним газом - пропелентом (азот), який не вступає в контакт з розчином. Не проколювати та не спалювати після використання. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, відкритого полум'я або будь-якого іншого джерела запалювання. Захищати від сонячного випромінювання. Не піддавати впливу температур, що перевищують 50 °С.

### **Виробник**

Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Свільно 20, 51000 Рієка, Хорватія. Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia.

Уповноважений представник виробника в Україні: Представництво «Ядран-Галенська Лабораторія д.д.» 01015, м. Київ, вул. Лаврська 16.