

## **Опис**

Оклюзійний стерильний пластир Milplast KIDS Occlusive застосовується в дитячій офтальмологічній практиці, як оклюзійна пов'язка для корекції зору (лікуванні методом оклюзії - закриття очей). Пластир абсорбує виділення, захищає від пилу, бруду і променів світла. У комплекті також йдуть веселі наклейки, для підняття настрою маленького пацієнта.

Дитячий окклюдер Milplast KIDS Occlusive легко і безболісно знімається, не залишаючи слідів клею на шкірі.

## **Спосіб застосування**

1. Очистіть область навколо ока від забруднень і вологи.
2. Зніміть захисні паперові смужки, зафіксуйте пластир на шкірі навколо ока.
3. Замініть пов'язку при необхідності.

Застосовувати в офтальмологічній практиці в якості оклюзійної пов'язки.  
Використовувати на шкірі не довше 24 годин!

## **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість матеріалів. Гіпоалергенність матеріалів знижує ймовірність прояву алергічних реакцій, але не виключає їх виникнення.