

Склад

Гіалуронова кислота у формі натрію гіалуронату, пропіленгліколь, карбомер, триетаноламін, вода очищена.

Властивості

Гіалуронова кислота є природним фізіологічним структурним елементом організму людини. Гіалуронова кислота зв'язує воду і утворює в'язко-еластичну мембрану-матрикс на поверхні слизової оболонки піхви. Таким чином, вона формує захисний матрикс на слизовій оболонці і допомагає відновити природне зволоження та може значно впливати на еластичність тканини і підтримувати природний процес загоєння.

Рекомендації щодо застосування

Вагінальний гель з гіалуроновою кислотою «РЕВІТАКСА® гель» призначений для усунення сухості піхви:

- жінкам у постменопаузальному періоді із встановленою атрофією вагіни і відчуттям подразнення, свербіжу та дискомфорту під час статевого контакту (диспареунія);
- жінкам у пременопаузальному періоді після недавнього хірургічного втручання у зоні геніталій, що створює передумови до диспареунії;
- жінкам із атрофією або дистрофією слизової оболонки піхви внаслідок дії іонізуючого опромінення, кріоабляції, хіміотерапії, кортикостероїдів, оральних контрацептивів або будь-яких інших медичних втручань.

Сприяє загоєнню ран після дітонародження, прискоренню одужання після хірургічних гінекологічних процедур на піхві, для зниження запалення і усунення дискомфорту при сухості слизової оболонки піхви, пов'язаної зі старінням або дефіцитом естрогенів при менопаузі і для полегшення статевого акту.

Спосіб застосування

«РЕВІТАКСА® гель» призначений дорослим для місцевого вагінального нанесення за потребою. Рекомендується наносити гель ввечері перед сном або відповідно до порад лікаря. Жінкам у постменопаузальному періоді із атрофією вагіни і сухістю через низькі рівні ендогенних естрогенів рекомендоване систематичне застосування гелю. Жінкам у пременопаузальному періоді із

недавніми хірургічними втручання-ми в зоні статевих органів тривалість застосування залежить від ходу загоєн-ня. У осіб, які отримують опромінення, гель слід застосовувати паралельно із радіотерапією. «РЕВІТАКСА® гель» слід застосовувати тільки місцево всередині піхви та/або зовнішньо у зоні статевих органів.

Особливості застосування

«РЕВІТАКСА® гель» призначений виключно для місцевого застосування всередині піхви або зовнішньо у зоні статевих органів. «РЕВІТАКСА® гель» зазвичай добре переноситься і, якщо ваш лікар не порадив інше, його можна застосовувати тривалий час. Можна застосовувати під час менструацій. Не використовуйте аплікатор повторно. Вагітні жінки та жінки, які годують груддю, можуть використовувати гель за призначенням лікаря. Не використовуйте одночасно з дезінфікуючими засобами, що містять солі четвертинного амонію, наприклад бензалконію хлорид, оскільки в їх присутності гіалуронова кислота може випадати в осад.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компоненту

Форма випуску

Вагінальний гель по 25 г (г) у тубі із 7 одноразовими аплі-каторами у картонній коробці.

Термін придатності

36 місяців від дати виготовлення. Термін придатності зазначено на упаковці. Не застосовувати після закінчення терміну придат-ності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C. Використати протягом місяця після відкриття.

Виробник

ХЕЛП С.А., вул. Валаорітоу, 10, 144 52 Μεταμορφώσις Αττικής, Греція / HELP S.A., 10, Valaoritou str., 144 52 Metamorfosi Attiki, Greece

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА» вул. Перемоги, буд. 9, офіс 20, Київ, 03170, Україна.

Сертифікат відповідності № UA.101.MD.6.0897-21.00

Виробник

ХЕЛП С.А., вул. Валаорітоу, 10, 144 52 Метаморфозіс Аттіка, Греція / HELP S.A., 10, Valaoritou str., 144 52 Metamorfosi Attiki, Greece

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА» вул. Перемоги, буд. 9, офіс 20, Київ, 03170, Україна.

Сертифікат відповідності № UA.101.MD.6.0897-21.00