

Опис

Аспіратор для носа Canpol babies, 5/119 має подвійний захист від попадання виділень в рот, для більшого психологічного комфорту можна додатково розмістити шматочок вати в пластмасовій частині трубки.

Припиніть процес всмоктування повітря, коли обидві носові перегородки будуть очищені. Витріть носик гігієнічною серветкою.

Інструкція з миття:

Виріб тримайте в чистоті. Мийте всі частини аспілятора в теплій воді з дитячим милом. Добре ополосніть та висушіть. Виріб можна мити в посудомийній машині.

Застереження

Завжди використовуйте аспіратор під наглядом дорослого. Виріб перевіряйте перед кожним використанням. У разі перших ознак пошкодження - викиньте.

Аспіратор не є іграшкою. Виріб і всі його частини зберігайте в місцях недоступних для дитини.