

Склад

D-пантенол, вітаміну Е ацетат, вітаміну А пальмітат, біотин, олія касторова гідрогенізована 40 ОЕ, поперечно зшита гіалуронова кислота, динатрієва сіль EDTA, N-гідроксиметил гліцинат натрію, калію сорбат, натуральний ароматизатор, ізотонічний буферний розчин рН 7,2.

Опис

Рінокросс спрей назальний – це медичний виріб, що змащує, підтримує гідратацію та еластичність слизової оболонки носа, сприяючи її реепітелізації.

Біотин, вітамін А та вітамін Е сприяють нормальній трофіці слизових оболонок.

Поперечно зшита гіалуронова кислота (0,1%) та D-пантенол (1%) забезпечують оптимальну гідратацію та в'язко-еластичність слизу носа.

Переваги

- забезпечують належне середовище для слизових оболонок;
- сприяє регенерації пошкоджених тканин;
- усуває дискомфорт в області носоглотки;
- ліквідує сухість в носоглотці.

Показання

У разі сухості та/або атрофії слизової оболонки носа, спричиненої несприятливими умовами навколишнього середовища або медикаментами (порошки, подразнюючі речовини, протинабрякові назальні спреї, оксигенотерапія тощо);

Як засіб, що сприяє покращенню лікування захворювань носової порожнини та придаткових пазух (риносинусит, алергічний риніт, медикаментозний риніт, хронічний атрофічний риніт, тощо);

Застосовується на етапі післяопераційного лікування захворювань носової порожнини та придаткових пазух для сприяння відновленню нормальної функції слизової оболонки.

Протипоказання

Не використовувати медичний виріб у разі відомої гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу.

Не використовувати медичний виріб у разі порушення цілісності упаковки.

Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Спосіб застосування та дози

1. Зняти захисний ковпачок, тримаючи великим пальцем основу флакону, вказівним та середнім пальцем тримати за краї розпилювача та натиснути.
2. Потім відпустити.
3. Повторювати процедуру до отримання першої дози продукту.
4. Злегка нахилити голову вперед, і після повільного видихання ввести продукт в ніздрю.
5. Вдихнути, закривши пальцем іншої руки ніздрю, в яку не вводили Рінокросс.
6. Рекомендовано застосовувати по два вприскування в обидві ніздрі двічі на день або згідно з рекомендацією лікаря.

Медичний виріб можна використовувати також за наявності незначних уражень слизової оболонки носа або шкіри навколо ніздрів.

Упаковка

20 мл во флаконе в картонной коробке.

Виробник

DMG, СРЛ, Італія.