

Опис

Для фіксації будь-якого виду пов'язок, після операцій, для закріплення катетерів, зондів, тампонів та інших виробів медичного призначення.

- Лицьова частина не містить клею, а зворотна повністю покрита клейкою речовиною;
- Гладкий, без плям, без дірок;
- Чистий, нестерильний.

Спосіб застосування

- Розірвати індивідуальну упаковку, дістати пластир;
- Відклеїти нетканий матеріал з клейкої основи;
- Накласти на чисту та суху шкіру;
- При появі індивідуальних алергічних реакцій – припинити використання та звернутися до лікаря;
- Після використання утилізувати згідно встановлених норм.

Умови зберігання

- Запобігати потраплянню вологи;
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів та нагріванню;
- Зберігати при температурі від 10 до 25°C