

Опис

Універсальні набори пластирів з подушечкою на тканинній, полімерній, поліуретановій, нетканій основах широкого спектру використання. Форма випуску стріп. Також може випускатися у рулонах на полімерній чи тканинній основах різного розміру (Економічний).

Спосіб застосування

Перед використанням вийняти пластир з паперового пакету та зняти захисну плівку, після чого подушечкою прикласти до рани, а краї пластиру притиснути до шкіри. Пластир може залишатись на шкірі протягом доби.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5°C до 35°C.

Показання

Призначений для фіксації пошкоджених пальців, при наданні першої допомоги в разі дрібних ран, подряпин, порізів.

Застереження

Гіперчутливість до основи пластиру, клеючої речовини.

Виробник

ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19, Україна