

Опис

Крем для фіксації зубних протезів «Освіжаючий смак» від Corega є спеціальним засобом, який добре закріплює зубні протези, дозволяючи їм тривалий час функціонувати в порожнині рота, не викликаючи навіть найменших незручностей. Завдяки крему виріб щільно прилягає до ясен, запобігаючи потраплянню частинок їжі під протез.

Безумовно, будь-який протез вимагає ретельного індивідуального підбору, однак необхідність в цьому кремі залишається. Після акуратної установки протеза і нанесення крему можна приймати будь-яку їжу і напої, в тому числі горіхи і фрукти, які здатні створити проблеми для незахищених зубів. Зі спеціальними засобами подібні проблеми пішли в минуле, і тепер ніщо не завадить вам насолоджуватися улюбленими продуктами. Засіб абсолютно безпечний у застосуванні і не викликає алергії, відрізняючись гарною сумісністю з емаллю зубів і не порушує кислотно-лужний баланс.

- Всебічна фіксація
- Ультрасвіжий м'ятний смак
- Не містить цинк

Спосіб застосування

Нанесення

1. Очистіть і висухіть зубний протез.
2. Нанесіть невелику кількість крему Корега Освіжаючий смак короткими смужками не дуже близько до країв зубних протезів.
3. Прополощіть рот теплою водою перед установкою зубного протезу.
4. Вставте протез в ротову порожнину, плавно притисніть і зімкніть щелепи для кращої фіксації на кілька секунд.
5. Не наносьте частіше, ніж один раз на день.

Видалення:

1. Прополощіть рот теплою водою.
2. Повільними погойдуючими рухами витягніть протез з порожнини рота.
3. За допомогою теплої води і зубної щітки з м'якою щетиною видаліть залишки крему з поверхні зубних протезів і з рота.
4. Для більш ретельного очищення протеза використовуйте таблетки Корега Біо Формула або таблетки Корега Відбілюючі для очищення зубних протезів.

Склад

Натрій-магній-цинк, сіль метілвенілефірмалеїнової кислоти, вазелін, камедь, рідкий парафін, кремній, ментил лактат, ментол, ароматизатор, барвник.