

Склад

сіль морська, вода очищена.

Опис

Медичний виріб містить ізотонічну морську воду в фізіологічній концентрації 9 г/л (g/l) NaCl. Делікатно очищує і промиває носові порожнини, покращує дихання, сприяє зволоженню і очищенню слизової носа. Концентрація солі оптимізована для запобігання будь-якому подразненню носа.

Рекомендації щодо застосування

- для щоденної гігієни порожнини носа;
- для полегшення симптомів сухості та подразнення слизової оболонки носа, в тому числі при сухості слизової оболонки носа, обумовленої знаходженням в приміщеннях зі штучним кондиціонуванням повітря та/або центральним опаленням;
- з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки носа в змінених мікрокліматичних умовах, у курців, при роботі в запилених приміщеннях та у складних кліматичних умовах;
- як засіб, що сприяє видаленню назального секрету та полегшенню дихання;
- як додатковий засіб при інфекційних та алергічних захворюваннях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки; для підготовки порожнини носа до нанесення лікарських засобів;
- для догляду за носовою порожниною після хірургічних втручань.

У вигляді спрею ізотонічний розчин застосовують у дітей з 3-х років та дорослих.

Застереження

Використання спрею протипоказано дітям до 3-х років через можливе механічне подразнення слизової оболонки носа. Не застосовувати при підвищеній чутливості до компонентів засобу.

Перед застосуванням після операції або травми носа слід проконсультуватися з лікарем. Перед використанням немовлятам, малюкам (до 3-х років) та вагітним жінкам слід проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування

Перед використанням медичного виробу уважно прочитайте інструкцію із застосування. Збережіть цю інструкцію із застосування на випадок, якщо вам знадобиться звернутися до неї знову.

Спрей. Спрей застосовують інтраназально (в носові ходи) дорослим і дітям з 3-х років. Дітям до 11 років слід застосовувати під наглядом дорослих. Люди похилого віку або люди з обмеженими можливостями при використанні спрею можуть потребувати сторонньої допомоги. Перед застосуванням збовтати та зняти захисний ковпачок спрею. Перед першим використанням натисніть на насос-дозатор до рівномірного розпилення. Тримайте флакон вертикально і вставте наконечник назального розпилювача в ніс. Розпилюйте під час дихання та обережно вдихайте через ніс. Дорослим рекомендовано по 2 зрошення; дітям віком від 3-х років – по 1-2 зрошення в кожную ніздрю 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу. Дайте засобу подіяти кілька секунд. Залишок рідини, що витікає, усунути. Після кожного використання знову надіньте захисний ковпачок.

Рекомендується індивідуальне використання флакона.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість та кратність використання виробу не обмежені, продукт є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

По 50, 100 мл (ml) у флаконі з пробкою-крапельницею. По 1 флакону у пачці.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул.
Академіка Амосова, 75.