

Опис

Умови роботи	Температура: 5~40°C; Відносна вологість: <85% RHATM: 70кПа~106кПа
Умови зберігання	Температура: -20~55°C Відносна вологість: < 85% RHATM: 70кПа~106кПа
Діапазон	32,0~42,9°C Нижче 32,0°C відображається Lo°C Вище 42,9°C відображається Hi°C
Час вимірювання	Первинні показники приблизно за 60 секунд
Автоматичне відключення	Автоматичне відключення приблизно через 10 хвилин
Акумулятор (в комплекті)	LR 41 (1,5 В)

Матеріал: акрилонітрил-бутадієн-стирол, полівінілхлорид.

Спосіб застосування

Використовуйте для вимірювання температури під пахвою, у ротовій порожнині або ректально.

Застережені заходи: не зберігайте пристрій під прямими сонячними променями, при високій температурі, у високій вологості або пилу. Продуктивність може бути погіршена. Припиніть використовувати термометр, якщо він працює нерівномірно або якщо дисплей не працює. Тримайте у недоступному для дітей

місці. Не намагайтеся розібрати пристрій, за винятком заміни батареї. Якщо термометр зберігався при температурі нижче нуля, перед використанням дайте термометру нагрітися природним шляхом до кімнатної температури.

Термін придатності

Дата виготовлення: 05.2024. Термін придатності: необмежений. Номер партії відповідає даті виготовлення.

Виробник

Країна походження: Китай

Виробник: Wenzhou Yosun Medical Technology Co., Ltd. (Веньчжоу Йосун Медікал Текнолоджі Ко., Лтд.)

Адреса виробника: No. 17, Shahong Road, Lingmen Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou 325603 Zhejiang P. R. China (Н. 17, Шахон Рoad, Лінгмен Беібайчсян Таун, Юецин, Веньчжоу 325603 Чжецзян, КНР)

Постачальник: Royaumann Co.,Ltd (Рояуманн Лтд)

Адреса постачальника: 3F, NO.113, Qiushi Road, Beiyuan, Yiwu, China. 322000 (3Ф, №113, Квіші Рoad, Бейюань, Іу, Китай 322000)

Імпортер: Приватне підприємство "Соломія-Сервіс", 79053, м. Львів, вул. Бойчука буд. 5 кв. 117. Претензії від споживачів приймає імпортер.