

Показання

Призначений для фіксації пошкоджених пальців, при наданні першої допомоги в разі дрібних ран, подряпин, порізів.

Протипоказання

Гіперчутливість до основи пластиру, клеючої речовини.

Застереження: Пластир не можна використовувати на відкритих післяопераційних ранах. В разі появи сильного подразнення пластир необхідно зняти.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням вийняти пластир з паперового пакету та зняти захисну плівку, після чого подушечкою прикласти до рани, а краї пластиру притиснути до шкіри. Пластир може залишатись на шкірі протягом доби.

Побічні ефекти

Подразнення шкіри у місці приклеювання.

Упаковка

10 пластирів на тканинній основі, 19 мм x 72 мм, в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Калина медицин. виробн. компанія»