

Опис

Склад набору: 6×100 см (6 см × 1 м)

Умови зберігання

Зберігайте продукт в оригінальній упаковці у чистому, сухому, прохолодному місці.

Спосіб застосування

- Очистити та підсушити пошкоджене місце.
- Зняти із пластиру захисну плівку.
- Накласти пластр на пошкоджене місце та притиснути.

Примітка для користувача та/або пацієнта: Усі претензії приймає ПП “Соломія-Сервіс”.

Застереження

Не застосовувати при індивідуальній непереносимості будь-якого з матеріалів пластиру. В разі виникнення подразнення не використовувати продукт.

Термін придатності/серія: зазначено на упаковці. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Виробник

Elvika Ltd. 24 Adazu str., Bukulti, LV-1024, Latvia

Імпортёр: ПП “Соломія-Сервіс” 79053, м. Львів, вул. Бойчука, буд. 5, кв. 117