

## **Состав**

Липосомальный раствор, гель алоэ вера 1%, экстракт ромашки, гиалуронат натрия, витамин Е- ТПГС, динатрий Б, РНМВ в буферном изотоническом растворе.

Не содержит хлоргексидина, тимеросала или хлорида бензалкония.

## **Описание**

СПРЕЙ НАВИ ЛИПО предназначен для наружного применения на открытых или закрытых глазах.

Липосомы известны своим свойством восстанавливать слезную пленку. Сочетание гиалуроната натрия и алоэ вера улучшает увлажняющие свойства липосомального раствора, предназначенного для облегчения состояний сухого глаза, который является естественным охлаждающим, увлажняющим и питательным компонентом для кожи.

## **Показания**

СПРЕЙ НАВИ ЛИПО - это успокаивающий и увлажняющий аэрозольный спрей, который:

- Успокаивает, освежает и обеспечивает комфорт сухим и усталым глазам.
- Освежает и защищает от потери влаги.
- Обеспечивает эффективное и долгосрочное облегчение сухим и усталым глазам.
- Восстанавливает физиологическое состояние поверхности глаза и слезной системы.

## **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам средства.

## **Особенности применения**

- В случае возникновения раздражения глаз, прекратите использование продукта и свяжитесь с врачом.
- Не используйте, если у вас аллергия на любой из компонентов продукта.
- Не прикасайтесь поверхности глаза распылителем.
- Не глотайте.

- Стерильный к первому открытию.
- После использования бутылку плотно закройте.

## **Способ применения и дозы**

### Инструкция по использованию на открытых глазах:

- Взболтайте перед использованием.
- При первом использовании, нажмите на насадку распылителя 3-4 раза.
- Держите бутылочку так, чтобы ваш большой палец (или указательный) был точно на дозатор, будьте внимательны, чтобы не закрыть выходное отверстие распылителя.
- Поднесите распылитель примерно на 10 см от глаза, он должен находиться сбоку от вашего лица.
- Смотрите вперед так, чтобы бутылочка находилась в пределах поля зрения, нажмите на дозатор так, чтобы система сделала необходимым распыления раствора.
- Рекомендуется делать два впрыска за одно применение, несколько раз в день по мере необходимости.
- Продукт можно применять с контактными линзами.

### Инструкция по использованию на закрытых глазах:

- Взболтайте перед использованием.
- При первом использовании нажмите насадку распылителя 3-4 раза.
- Держите бутылку так, чтобы не закрывать отверстие для распыления, примерно на 10 см от закрытых век.
- Нанесите 1-2 раза в закрытые веки.
- Сразу после применения держите глаза закрытыми несколько секунд.
- Частота использования - при необходимости.

## **Срок годности**

См. на упаковке.

Не используйте по истечении срока годности. Используйте в течение 28 дней с момента вскрытия.

## **Условия хранения**

Держите подальше от источников тепла. Храните в сухом месте при температуре между 5 и 35 ° C.

**Упаковка**

По 10 мл спрея во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

НОВАКС ФАРМА.

Коронадо Проспект Фонвьер 20, МС 98000 МОНАКО