

## **Состав**

Натриевая соль гиалуроновой кислоты, α-глицерилфосфорилхолин, витамин B12 (цианокобаламин), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), D-пантенол, буферный изотонический раствор pH 7,2.

## **Характеристика**

Различные травмы механического, химического или физического характера могут повреждать целостность поверхности роговицы. Эпителий роговицы содержит много нервных окончаний, которые обеспечивают поддержание морфофункциональной целостности.

Офтассиале, капли глазные, содержит гиалуроновую кислоту, глицерилфосфорилхолин и D-пантенол, которые способствуют реэпителизации и восстановлению нервных окончаний роговицы.

Офтассиале, капли глазные, увеличивают объем слезной пленки и способствуют ее стабилизации. Комплекс витаминов (витамин B12 и витамин B6), который содержится в растворе, усиливает защитное свойство поверхности глаза, ограничивая негативное влияние внешних факторов и хирургических вмешательств.

Офтассиале, капли глазные, является медицинским изделием, предназначенным для увлажнения, защиты роговицы, а также для уменьшения дискомфорта в глазах, болевых симптомов, вызванных ощущением инородного тела, внешними факторами, хирургическими операциями и травмами, подвергающихся местному лечению.

Офтассиале, капли глазные, способствуют процессам реэпителизации роговицы и восстановлению нервных окончаний.

Технология OSD (офтальмологический дозатор нажимного типа) обеспечивает инновационную доставку абсолютно стерильных глазных капель без консервантов.

## **Рекомендации по использованию**

Нет необходимости удалять контактные линзы перед использованием Офтассиале, капель глазных.

Перед использованием медицинского изделия следует помыть руки.

Закапывать по 1-2 капли в каждый глаз 2-3 раза в сутки или по рекомендациям врача.

Убедитесь, что капельница не контактирует с поверхностью глаза.

### **Особые указания**

В случае возникновения побочных реакций следует прекратить применение медицинского изделия и обратиться к врачу.

Перед использованием медицинского изделия необходимо убедиться, что контейнер не поврежден.

Не используйте изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке. Срок годности указан в отношении запечатанного продукта при условии надлежащего хранения.

Для закапывания в глаза, не глотать.

Не используйте Офтассиале, капли глазные, если у вас аллергия или в случае известной гиперчувствительности к компонентам медицинского изделия.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 30 °C.

### **Упаковка**

По 10 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Д.М.Г. Италия С.р.л / D.M.G. Italia S.r.l.