

Состав

Состав

Изотонический раствор рапы «Моршинская № 1». Содержит такие микроэлементы: K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺ и анионы: Cl⁻, SO₄²⁻.

Свойства

Средство для орошения и промывания носа Но-Соль очищающий:

- способствует очищению слизистой оболочки носа от уличной и комнатной пыли;
- благодаря своим свойствам средство для орошения и промывания носа Но-Соль очищающий восстанавливает функции носа, тем самым уменьшает местный воспалительный процесс и снижает риск осложнений;
- средство для орошения и промывания носа Но-Соль очищающий поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа;
- разжижает слизь и нормализует его выработку в слизистой оболочке носовой полости;
- улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению патогенных бактерий и вирусов;
- смывает и удаляет аллергены и гаптены со слизистой оболочки носа.

Рекомендации к применению

Средство для орошения и промывания носа Но-Соль Очищающий применяется:

- промывание носовой полости Средством для орошения и промывания носа Но-Соль очищающий приводит к механической очистке слизистой оболочки от пыли, слизистых выделений и других патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку;
- при воспалительных заболеваниях носа с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений использование Средства для орошения и промывания носа Но-Соль очищающий способствует более быстрой эвакуации слизи, улучшает эффект от применения местных лекарственных средств и облегчает дыхание;
- как средство ежедневной гигиены полости носа для сохранения защитных свойств слизистой оболочки в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (кондиционирование, центральное отопление,

задымленные помещения и т.д.) с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях;

- при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);
- как средство профилактики и в случае заболевания ОРЗ, ОРВИ, простуде;
- для очистки слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированной слизи;
- с профилактической целью для очистки носовой полости при работе во вредных условиях;
- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;
- в составе комплексного лечения аденоидов у детей;
- для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их всасывания);
- для облегчения состояния пациента при аллергических, вазомоторных и круглогодичных ринитах.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применяется.

Способ применения и дозы

Капли назальные:

Взрослым — по 2 капли;

детям в возрасте от 1 года — по 1-2 капли;

детям до 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической целью — 1-4 раза в сутки.

Схема вскрытия флакона капель назальных:

1. Доверните колпачок до упора по часовой стрелке.
2. Специальный шип сделает отверстие в верхней части.
3. Теперь можно пользоваться средством.
4. Техника промывания носа

Промывание носа у детей рекомендуется проводить в положении лежа.

- 1) Поверните голову ребенка набок и немного вперед (не запрокидывая головы).

2) Введите кончик флакона-капельницы в нос ребенка (в верхний носовой ход) и закапайте 1-2 капли средства в зависимости от возраста. Для детей до 1 года — по 1 капле, для детей от 1 года — по 1-2 капли в каждый носовой ход.

3) Проведите эту процедуру с другим носовым ходом.

Техника промывания носа:

1. Промывания носа рекомендуется проводить стоя, слегка наклонившись над раковиной.
2. Введите наконечник флакона в носовой вход. Напротяжении 2-3 секунд промывайте носовую полость соленым раствором.
3. Прочистите нос (высморкайтесь, освободите носовые хода быстрым резким выдыхом через нос).
4. Проведите эту процедуру с другим носовым ходом.

Продолжительность и кратность использования средства неограничена, изделие безопасное при длительном использовании, не вызывает привыкания.

Дети

С рождения.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

10 мл во флаконе полиэтиленовом закупоренный колпачком.

Производитель

АО "Фармак", Украина.