

Состав

В 100 мл «Квикс® алоэ» содержится: 28,6 мл воды Атлантического океана, 71,4 мл дистиллированной воды и 0,05 г экстракта алоэ вера.

Концентрация соли в «Квикс® алоэ» соответствует примерно 9 г NaCl на литр (изотоническая).

Не содержит химических добавок и консервантов.

Лекарственная форма

«Квикс® алоэ» - природный изотонический спрей назальный, содержащий воду Атлантического океана, богатую полезными минералами и микроэлементами, а также экстракт алоэ.

Концентрация соли в «Квикс® алоэ» соответствует ее природной концентрации в организме, а потому не повреждает слизистую носа.

«Квикс® алоэ» - это натуральное средство для увлажнения слизистой оболочки носа, снятия раздражения, улучшение ее функции фильтрации и увлажнения воздуха, который мы вдыхаем. Таким образом поддерживается здоровое состояние дыхательных путей.

Свойства медицинского изделия:

- Способствует поддержанию функции носа в здоровом состоянии.
- Очищает слизистую носа от бактерий, вирусов, аллергенов, корок, слизи, частиц пыли.
- Разжижает слизь и способствует его удалению.
- Оказывает увлажняющий эффект, снимает раздражение слизистой оболочки носа.

Показания

- Ежедневная гигиена и уход за носовой полостью для поддержания защитных свойств слизистой.
- Мягкое очищение слизистой оболочки носа.
- Облегчение симптомов сухости и раздражения слизистой оболочки носа.
- Профилактика острых респираторных вирусных инфекций (также при хронических воспалительных заболеваниях носовой полости, околоносовых пазух, носоглотки).

- Профилактика назальных аллергических реакций (также во время беременности и в период кормления грудью)
- Как дополнительное средство при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки.
- Подготовка полости носа к нанесению лекарственных средств.
- В качестве средства помощи детям, которые не могут самостоятельно сморкаться.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к морской воде или алоэ вера.
- Дети до 6 месяцев.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

На данный момент взаимодействий с лекарственными средствами не выявлено.

Способ применения и дозы

Дети от 6 месяцев до 6 лет: 1 впрыскивание в каждый носовой ход 4 раза в сутки.

Взрослые и дети старше 6 лет: 1-3 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки, в случае необходимости.

Опыт применения в особых группах пациентов

Беременность и кормление грудью

Разрешен к использованию во время беременности и в период кормления грудью послеоперационное применение.

Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом в случае применения после хирургических вмешательств.

1. Снимите колпачок.
2. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на манжету наконечника к достижению мелкого аэрозольного распыления.
3. Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету с обеих сторон наконечника.
4. Протрите наконечник чистой салфеткой и наденьте колпачок.
5. Наконечник обеспечивает дозированный поток и равномерное распределение спрея, который увлажняет и очищает слизистую оболочку

носа.

«Квикс® алоэ» можно использовать перед применением других назальных спреев.

Продолжительность использования не ограничено.

Не вызывает привыкания.

Побочные реакции

На данный момент побочных эффектов выявлено не было.

Использовать с осторожностью.

После оперативных вмешательств и травм в области носа «Квикс® алоэ» следует применять только после консультации с врачом.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Не используйте «Квикс® алоэ» после окончания срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия флакона «Квикс® алоэ» следует использовать в течение 6 месяцев.

Упаковка

Флакон спрея «Квикс® алоэ» содержит 30 мл раствора. В каждом флаконе содержится примерно 220 доз. Флакон оснащен системой антибактериальной защиты, который предотвращает проникновение микробов в течение всего периода использования.

«Квикс® алоэ» является медицинским изделием.

Производитель

Фармастер

Производственная зона где Краффт.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

67150 Ерстейн, Франция.