

Состав

Это серологический метод анализа образцов крови, как и ИФА, СІТО TEST COVID-19 выявляет наличие IgM и IgG к коронавирусной инфекции, обычно IgM можно обнаружить с 7го дня после появления первых симптомов.

Способ применения

1. Подготовить все необходимые для исследования материалы: комплектующие теста и часы.
2. Тест-кассету, буфер необходимо выдержать при комнатной температуре столько времени, чтобы их температура равна комнатной (15-30 °C).
3. Открыть запаянный пакет, достать тест-кассету и разместить ее на столе с горизонтальной поверхностью. Следует выполнить тестирование в течение 1 h (ч) после открытия пакета.
4. Провести забор образца капиллярной крови из пальца. Для этого необходимо:
5. Помыть руки теплой водой с мылом или протереть палец спиртовой салфеткой, высушить.
6. Массировать руку в направлении кончиков среднего или безымянного пальца, не касаясь места прокола.
7. Проколоть кожу стерильным ланцетом, вытереть новой спиртовой салфеткой первую каплю крови.
8. Мягко массируя руку от запястья к ладони и пальцев, достичь образования круглой капли крови над местом прокола;
9. Отобрать одноразовой пипеткой образец крови до предела наполнения (примерно 10 µl (мкл)), указанной на пипетке, избегая образования пузырьков воздуха.
10. Внести отобранный образец крови в лунку (S) на тест-кассете. Затем добавить 2 капли буфера лунку (B) и начать отсчет времени.
11. Учет результата провести через 10 min (мин) после внесения образца. Не принимать во внимание результат по завершению 20 min (мин).

Условия хранения

Тест можно хранить и транспортировать при температуре от 2° до 30°C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на герметичной упаковке. Тест должен находиться в герметичной упаковке до момента использования. Не замораживать. Не использовать после истечения срока годности.

Упаковка

1 набор для быстрого проведения теста.

Производитель

ООО "Фармаско", Украина.