

Описание

Только для in vitro диагностики. Оценка результатов тестирования проводится визуально путем сравнения реакгентной полоски со шкалой цветов, которая нанесена на контейнер или при помощи анализатора. При визуальном проведении оценки результатов необходимо придерживаться всех указаний, содержащихся в инструкции.

Показатели зависят от нескольких факторов:

- изменчивости цветового восприятия;
- наличия или отсутствия препятствующих и обычно присутствующих основных составляющих мочи;
- лабораторных условий, в которых проводится исследование (например, освещение, температура и влажность).

Показания

Реагентные полоски предназначены для экспресс-анализа мочи с целью выявления глюкозы, кетонов (ацетоуксусной кислоты).

Меры предосторожности

Предостережение

- Только для профессиональной in vitro диагностики
- Не вынимать осушитель из контейнера с полосками
- Открывать контейнер и доставать полоски нужно непосредственно перед тестированием
- Не использовать тест в случае повреждения целостности контейнера
- Хранить в недоступном для детей месте
- Тест-полоски предназначены только для исследования мочи и не должны использоваться для анализа других биологических жидкостей организма
- Место работы должно быть чистым и без следов моющих или других химикатов

Способ применения и дозы

Для получения правильных результатов следует соблюдать процедуру тестирования:

- Достаньте полоску из контейнера и сразу закройте его крышкой. Осмотрите полоску. Тест-полоска непригодна для использования, если тестовая зона обесцвечена или потемнела.
- Погрузите тестовую зону полоски в мочу не более чем на 2 секунды.
- Проведите ребром полоски по краю емкости для того, чтобы удалить остатки мочи, при этом тестовая зона не должна касаться края емкости.
- Держа полоску в горизонтальном положении, промокните ее адсорбирующим материалом для окончательного удаления остатков мочи. Избыток мочи может привести к взаимодействию реактивов соседних зон на тестовой зоне и, как результат, к появлению неверных результатов тестирования.
- Интерпретацию результатов тестирования проведите через 60 секунд при интенсивном освещении путем сравнения результатов тестирования со шкалой цветов на контейнере. При учете результатов полоску следует держать в горизонтальном положении для того, чтобы избежать взаимодействия реактивов соседних участков в тестовой зоне в случае избытка мочи.

Условия хранения

После извлечения необходимого количества полосок, контейнер необходимо сразу закрыть, плотно закрутив крышку

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 2 до 30°C, плотно закрытым, не замораживать

Избегать влаги и прямых солнечных лучей.

Не использовать после истечения срока годности.

Упаковка

50 штук в картонной коробке.

Производитель

DFI Co Ltd, Корея