

Описание

o.b. ProComfort с новой технологией Smooth Technology для еще более гладкой поверхности тампона имеют уникальное шелковистое покрытие SilkTouch, обеспечивающее максимально легкое введение. Спиралевидные желобки FluidLock обеспечивают надежную защиту, эффективно направляя жидкость внутрь тампона. Все это делает небольшие по размеру тампоны o.b. ProComfort легкими и удобными в использовании даже в дни с незначительными выделениями, или когда вы только начинаете пользоваться тампонами.

o.b. ProComfort со степенью впитываемости Mini и Normal рекомендуются в следующих случаях:

- Для женщин и девушек, которые только начинают пользоваться тампонами.
- В дни с незначительными или средними выделениями.
- Для девушек, чьи менструальные выделения невелики в связи с использованием гормональных контрацептивов.
- Для мам, которые впервые объясняют своей дочери, как пользоваться тампонами.

Как использовать

1. Вымой руки. Разорви защитную оболочку, чтобы извлечь безаппликаторный тампон.
2. Потяни внутреннюю трубочку аппликатора из внешней на себя до характерного «клика» (см. схему), чтобы удлинить аппликатор тампона до его полного размера.
3. Большим и средним пальцем возьми аппликатор за внешнюю трубочку и расположи закругленный конец аппликатора у входа во влагалище
4. Осторожно раздвинь половые губы пальцами свободной руки. Вагинальное отверстие расположено между отверстием мочеиспускательного канала и анальным отверстием.
5. Осторожно введи верхнюю часть аппликатора во влагалище под наклоном, пока пальцы не коснутся тела.
6. Указательным пальцем введи внутреннюю трубочку аппликатора во внешнюю. Теперь тампон находится в правильном положении, так, что ты его не ощущаешь
7. Удали аппликаторные трубочки. Нить возврата тампона должна оставаться снаружи. Убедись, что ты удалила обе трубочки аппликатора, затем выкини их (не смывай аппликатор в канализацию, поскольку он пластиковый) и вымой руки.

Внимание! Упаковка содержит в себе листовку с важной информацией о редкой и опасной реакции - менструальный СТШ. Пожалуйста, прочтите и сохраните ее (важно для Вашего здоровья и личной гигиены).