

Состав

Натрий-магний-цинк, соль метилвенилэфирмалеиновой кислоты, петролатум, камедь, жидкий парафин, кремний, ментил лактат, ментол, ароматизатор, краситель.

Описание

Крем позволяет протезу максимально прочно держаться на деснах, чтобы избежать дискомфорта в любой ситуации.

Особенности

- использование продукта абсолютно безопасно, не вызывает аллергии и не имеет противопоказаний и побочных эффектов;
- крем выполнен из экологически чистых веществ, которые полностью совместимы с любым типом эмали и не нарушают кислотно-щелочной баланс;
- продукт не содержит цинк;
- крем помогает зубному протезу очень прочно и основательно держаться в полости рта, позволяя Вам принимать любую пищу и напитки, включая продукты, которые ранее были нежелательны (например, орехи).

Способ применения и дозы

Нанесение:

1. Очистите и высушите зубной протез.
2. Нанесите небольшое количество крема короткими полосками не слишком близко к краям зубных протезов.
3. Прополощите рот теплой водой перед установкой зубного протеза.
4. Вставьте протез в ротовую полость, плавно прижмите и сомкните челюсти для лучшей фиксации на несколько секунд.
5. Не наносите чаще одного раза в день.

Извлечение:

1. Прополощите рот теплой водой.
2. Медленными покачивающими движениями извлеките протез из полости рта.
3. При помощи теплой воды и зубной щетки с мягкой щетиной удалите остатки крема с поверхности зубных протезов и из полости рта.

Условия хранения

Хранить при температуре до 25°C, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 70 мл в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

Производитель

Stafford Miller, Ирландия.