

Состав

Бикарбонат натрия, тройная калиевая соль пероксомоносульфата, гидрогенсульфата и сульфата, натрия перборат, лимонная кислота, лаурилсульфат натрия, мятное масло, ментоловое масло, С.І. 73000.

Свойства

Продукт обладает высоким качеством, простотой в использовании, гарантированно подарит отличный результат и существенно упростит процесс очищения съемных протезов.

Таблетки мгновенно растворяются в обычной воде, окрашивая ее в голубой оттенок, при этом насыщая концентрированными окисляющими микроэлементами, способными эффективно растворить налет и удалить органические остатки.

Средство обладает дезинфицирующими и антибактериальными свойствами, и абсолютно безопасно в применении.

Способ применения и дозы

1. Очищающую таблетку вместе с протезом положить в бокал с теплой водой.
2. Спустя 10 мин. протез становится чистым, гигиеническим и свежим.
3. Протез можно оставить в очищающем растворе на ночь.
4. Перед установкой протеза его необходимо промыть в проточной воде.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 32 таблетки в упаковке.

Производитель

Др. ТайссНатурваренГмбХ, Германия.