

Состав

D-пантенол, витамина Е ацетат, витамина А пальмитат, биотин, масло касторовое гидрогенизированное 40 ОЭ, поперечно сшитая гиалуроновая кислота, динатриевая соль EDTA, N-гидроксиметил глицинат натрия, калия сорбат, натуральный ароматизатор, изотонический буферный раствор pH 7,2.

Описание

Ринокросс спрей назальный - это медицинский изделие, смазывает, поддерживает гидратацию и эластичность слизистой оболочки носа, способствуя ее реэпителизации.

Биотин, витамин А и витамин Е способствуют нормальной трофике слизистых оболочек.

Поперечно сшитая гиалуроновая кислота (0,1%) и D-пантенол (1%) обеспечивают оптимальную гидратацию и вязко-эластичность слизи носа.

Преимущества

- обеспечивают надлежащее среду для слизистых оболочек;
- способствует регенерации поврежденных тканей;
- устраняет дискомфорт в области носоглотки;
- ликвидирует сухость в носоглотке.

Показания

В случае сухости и / или атрофии слизистой оболочки носа, вызванной неблагоприятными условиями окружающей среды или медикаментами (порошки, раздражающие вещества, противоотечные назальные спреи, оксигенотерапия и т.п.);

Как средство, способствующее улучшению лечения заболеваний носовой полости и придаточных пазух (риносинусит, аллергический ринит, медикаментозный ринит, хронический атрофический ринит и т.д.);

Применяется на этапе послеоперационного лечения заболеваний носовой полости и придаточных пазух для содействия восстановлению нормальной функции слизистой оболочки.

Противопоказания

Не использовать медицинское изделие в случае известной гиперчувствительности к компонентам медицинского изделия.

Не использовать медицинское изделие в случае нарушения целостности упаковки.

Не использовать медицинское изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Способ применения и дозы

1. Снять защитный колпачок, держа большим пальцем основу флакона, указательным и средним пальцем держать за края распылителя и нажать.
2. Затем отпустить.
3. Повторять процедуру до получения первой дозы препарата.
4. Слегка наклонить голову вперед, и после медленного выдоха ввести продукт в ноздрю.
5. Вдохнуть, закрыв пальцем другой руки ноздрю, в которую вводили Ринокросс.
6. Рекомендуется применять по два впрыскивания в обе ноздри дважды в день или согласно рекомендации врача.

Медицинское изделие можно использовать также при наличии незначительных поражений слизистой оболочки носа или кожи вокруг ноздрей.

Упаковка

20 мл во флаконе в картонной коробке.

Производитель

DMG, Срл, Италия.