

## **Описание**

Обеспечивает мгновенное обезболивающее действие и специальную защиту вальгусной деформации мизинца стопы.

## **Состав**

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи

- 1 шт. в уп.
- Размер универсальный (эластичный)

## **Способ применения**

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Наденьте изделие на мизинец стопы, разместив гелевую подушечку на вальгусную «косточку».
3. После снятия изделия промойте теплой водой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания изделие готово к повторному использованию.

## **Показания**

1. Подагра
2. Бурсит суставов пятого пальца
3. Начальная и средняя степень вальгусной деформации мизинца
4. Для уменьшения боли в суставе мизинца и амортизации боковых ушибов

5. Облегчает ходьбу, защищая имеющиеся мозоли (в том числе сухие) или отверждение.

### **Предостережение**

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.