

## **Описание**

Эластичный тканевый протектор с гель-полимерной подушкой для защиты вальгусной «косточки» большого пальца стопы.

## **Состав**

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи

Тканевая основа: полиамид 86%, эластан Lycra 14%

1 шт. в уп.

Размер универсальный (эластичный)

## **Способ применения**

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Наденьте защитный чехол на большой палец стопы, разместив гелевую подушечку на вальгусную «косточку».
3. После снятия изделия промойте теплой водой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания изделие готово к повторному использованию.

## **Показания**

- Для уменьшения давления и защиты от трения большого пальца стопы
- Способствует выравниванию позиции пальца и обеспечивает поддержку

- Равномерно распределяет нагрузку на стопе, уменьшает давление на вальгусный изгон и предотвращает натирание мозолей.
- Предупреждает дальнейшее прогрессирование деформации

### **Предостережение**

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.