

## **Описание**

Предназначен для обеспечения обезболивающего и амортизирующего действия в передней части стопы

## **Состав**

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи

Клеевой слой

1 пара в упаковке.

Размер универсальный

## **Способ применения**

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Разместите подушку клейкой частью к внутренней части обуви под переднюю часть стопы. Прижмите к обуви для надежного крепления.
3. После снятия изделия промойте теплой водой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания изделие готово к повторному использованию.

## **Показания**

- Разгрузка и амортизация переднего отдела стопы
- Снятие усталости и облегчение при ходьбе в обуви на каблуке

- Для уменьшения ощущения усталости в переднем отделе стопы при поперечном плоскостопии

### **Предостережение**

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу, перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.