

Состав

ТИАВ (микрокристаллы титана диоксида с ковалентно связанными ионами серебра); натрия гиалуронат, экстракт алоэ барбаденского; каприловый/каприновый триглицерид; стеарат ПЭГ-6 (и) гликоля стеарат (и) стеарат ПЭГ-32, глицерил стеарат.

Описание

Медицинское изделие ВагиТиаб выпускается в форме быстрорастворимых мягких желатиновых капсул, содержащих несколько компонентов, благодаря свойствам веществ которых ВагиТиаб создает эффект защитного барьера в качестве вспомогательного медицинского изделия при лечении бактериальных и вирусных инфекций, таких как вульвовагинит, генитальный герпес и кондиломы, а также послеродовых повреждений.

ВагиТиаб образует защитный барьер в зоне поражения с целью изоляции и защиты тканей от внешних раздражителей и способствует процессу нормального физиологического рубцевания и процесса заживления.

ВагиТиаб обеспечивает двойное действие:

- изолирует область применения от внешних агрессивных воздействий микробов;
- ограничивает микробную колонизацию в области применения, создавая идеальные условия для восстановления естественных физиологических функций тканей.

Показания

Вспомогательное медицинское изделие ВагиТиаб применяют во время:

- лечения бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, таких как кандидоз и кондиломы;
- лечении послеродовых повреждений;
- в профилактике рецидивов генитального герпеса 2 (ВПГ-2).

Медицинское изделие ВагиТиаб не является ни спермицидом, ни контрацептивом.

Способ применения

1. перед применением тщательно очистить область половых органов.
2. ввести капсулу ВагиТиаб глубоко во влагалище.
3. повторять применение один раз в день в течение семи дней.

Медицинское изделие ВагиТиаб следует применять при появлении первых симптомов (зуд, жжение, неприятные ощущения и т.д.). После местной терапии период приостановления применения изделия не требуется.

Предостережение

- Применять медицинское изделие только при неповрежденной эпителиальной ткани.
- Не применять изделие для целей, кроме тех, что указаны в инструкции к применению.
- Перед применением тщательно вымыть руки.
- Не применять изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Хранить при комнатной температуре и держать подальше от источников тепла.
- Не замораживать.
- Держать в недоступном для детей месте.
- Только для местного применения - не глотать.
- Не применять, если упаковка открыта или повреждена.

- Не применять в случае известной чувствительности к любому из компонентов.
- Прекратить лечение в случае аномальных кожных реакций.
- В случае длительного применения проконсультироваться с врачом.
- Изделие не является ни спермицидом, ни контрацептивом.

Противопоказания

Случаев передозировки не наблюдалось. Повышенная чувствительность к любому из компонентов. Взаимодействие с лекарственными средствами и веществами не наблюдалось.

Условия хранения

Хранить при температуре 9-25 °C в недоступном для детей месте. Держать подальше от источников повышенной влаги и тепла. Под воздействием прямых солнечных лучей изделие может приобрести легкий желтоватый цвет, что не влияет на его функциональные особенности и срок годности.

Упаковка

по 10 капсул в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

Производитель

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЭнТиСи С.р.л., Виа Луиджи Рацца, 3, 20124 Милан (МИ), Италия (NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano (MI), Italy).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ:

ООО Конарк Интелмед, ул. Шевченко, 315, г. Харьков, 61033, Украина,
тел. +38 057 714-38-01, +38 057 714-38 02.

Уполномоченный представитель в Украине осуществляет функции по
принятию претензий от потребителей.