

Опис

SENI Basic – це підгузки, які задовольняють базові потреби людей із середнім і важким ступенем нетримання.

Виріб також має характеристики, які забезпечують відчуття сухості та захист від протікань.

Ізолююча плівка по всій поверхні підгузка захищає від протікань. Завдяки антибактеріальному суперабсорбенту підгузок добре вбирає та утримує всередині вологу, а також нейтралізує неприємні запахи.

Вологонепроникні бортики, розгорнуті назовні, надійно утримують рідину всередині підгузка і запобігають боковим протіканням. Надійну фіксацію забезпечують міцні подвійні липучки.

Інформацію про наповнення та необхідність заміни підгузка дає індикатор вологості - напис з інформацією про виріб на зовнішньому боці поглинаючої вкладки.

Можуть використовуватися як при нетриманні сечі, так і при нетриманні кала.

- Поглинання: 1500 г
- Розмір: S (1)
- Об'єм талії і стегон: 55-80 см
- Кількість в упаковці: 30 шт.

Спосіб застосування

Перед надяганням підгузок слід "активувати", розправити.

Активованій підгузок розмістити між ногами, розправити його спереду і ззаду так, щоб він добре прилягав до тіла. Закріпіть підгузок за допомогою застібок-липучок, починаючи з нижніх застібок, які приклейте трохи по діагоналі догори. Після закріплення нижніх застібок закріпіть верхні застібки-липучки, фіксуючи підгузок на талії. Надягнувши підгузок, переконайтеся, що липучки добре закріплені, а підгузок добре прилягає до тіла. При цьому зверніть увагу на те, щоб захисні оборки в паховій області не підгорнулися всередину і підгузок ніде не стискав тіло.

Використаний підгузок згорніть і викиньте у смітник. Не викидайте використаний виріб в унітаз.

Склад

Целюлоза, нетканий матеріал, суперабсорбент, плівка PE.