

Опис

Шприц – медичний інструмент, який широко використовують у всіх областях медичної практики, особливо у сферах, де потрібне точне змішування або послідовна ін'єкція в тканини організму рідких лікарських засобів, відсмоктування ексудатів та інших рідин, а також для промивання порожнин або виведення шматочків тканин. Вони можуть використовуватися для змішування та ін'єкції компонентів вакцин, приготування розчинів або сумішей ліків, а також у хірургічних процедурах, де необхідно ін'єкувати кілька препаратів одночасно.

Трикомпонентний шприц 2В складається з трьох частин: циліндра, поршня і полімерної муфти. Усі деталі шприців є стерильними і призначені для одноразового використання.

Основні особливості продукту:

- Наявність двох голок забезпечує ще більшу стерильність при використанні: одна для набору лікарського засобу, де стерильність може бути порушена при проколі пробки флакона, а інша для проведення ін'єкцій
- Голки різного розміру, що дозволяє вибирати голку залежно від товщини шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м'язів
- Виготовлені з високоякісних безпечних матеріалів найвищої якості та відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки
- Абсолютно прозорий циліндр, чітке градуювання шкали та мінімальний остаточний об'єм забезпечують точність дозування медикаментів
- Надійне з'єднання типу "Луер"
- Голки з тригранним атравматичним лазерним заточуванням і силіконовим покриттям плавно розсовують тканини і зводять до мінімуму травматизацію
- Мають плавний та м'який хід поршня, тому забезпечують точність дозування, що підвищує ефективність процедур ін'єкції, особливо в умовах роботи з дорогими та складними лікарськими речовинами
- Стерилізовані оксидом етилену, нетоксичні
- Зручні та безпечні під час використання
- Для одноразового використання

Спосіб застосування

Перед використанням перевірте цілісність споживчого пакування та термін придатності. Відкрийте упаковку та вийміть шприц та голку. Щільно надягніть на конус шприца голку. Наберіть у шприц лікарський препарат. Розташуйте шприц вертикально та видавіть, натискаючи на шток-поршень, пухирці повітря. Зробіть

ін'єкцію.

Застереження

При порушенні цілісності упаковки використання заборонено. Після відкриття упаковки зберігання заборонено. Утилізувати як медичні відходи.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 10°C до 40°C.